

# Reprocesamiento higiénico

## Oftalmoscopio indirecto HEINE OMEGA®

### Advertencia general e información de seguridad



**¡ADVERTENCIA!** Este símbolo llama la atención sobre una situación potencialmente peligrosa. Su incumplimiento puede provocar lesiones graves o moderadas.



**¡NOTA!** Este símbolo se emplea para la información respecto a la puesta en marcha, funcionamiento o mantenimiento, siempre que no puedan entrañar peligro.

	<p>Se deben respetar las instrucciones sobre el reprocesamiento higiénico, en base a las normativas, leyes y directrices nacionales. Se deben implementar en las guías y normativas internas del hospital/de la clínica.</p>
	<p>Efectúe una depuración higiénica si cree que el aparato ha podido resultar contaminado.</p> <p>Las medidas de reprocesamiento descritas no sustituyen las reglas específicas aplicables para su institución/departamento.</p> <p>HEINE Optotechnik solo aprueba los agentes y procedimientos mencionados en estas instrucciones.</p> <p>El reprocesamiento higiénico deben llevarlo a cabo personas con la adecuada experiencia en higiene.</p> <p>Siga las indicaciones del fabricante del agente limpiador.</p> <p>Evite que entre líquido en el dispositivo.</p> <p>Los procedimientos de reprocesamiento descritos se representan junto con las correspondientes compatibilidades de material. El reprocesamiento se debe llevar a cabo de acuerdo con un proceso de procesamiento aprobado. HEINE Optotechnik GmbH &amp; Co. KG no puede garantizar la desinfección de estos procedimientos. Debe ser validado por el usuario, por ejemplo el hospital o los fabricantes del equipo de reprocesamiento.</p>
	<p>Antes de usarlo de nuevo, asegúrese de que el aparato esté completamente seco después de la limpieza.</p> <p>Para obtener más detalles importantes en cuanto a los procedimientos de procesamiento, consulte las Preguntas frecuentes para el reprocesamiento higiénico en nuestra página web.</p>



## Desinfección con un paño

### 1. Preparación

Efectúe una depuración higiénica si cree que el aparato ha podido resultar contaminado. Apague el dispositivo y deje que se enfríe.

### 2. Limpieza y desinfección manual



Hay que prestar atención a que todas las superficies se hayan humedecido completamente durante el tiempo de exposición completo especificado por el fabricante del desinfectante. En caso necesario, aumentar el número de procedimientos de limpieza con un paño y/o el número de paños.

#### *Equipo*

- Producto de limpieza, en caso necesario: enzimática (p. ej. neodisher® MediClean)
- Desinfectante:  
alcohólico (p. ej. Incides® N)  
o  
alcohólico + aminos cuaternario (p. ej. Super Sani-Cloth®)

#### *Implementación*

- En caso de que haya mucha suciedad, limpie primero con una toallita empapada en agente de limpieza antes de desinfectar con una toallita desinfectante.
- Limpie y desinfecte el dispositivo manualmente.  
(OMEGA 500 y Lupas de oftalmoscopia)
- Hay que prestar especial atención a las zonas de difícil acceso.
- Limpie minuciosamente las áreas tocadas: p. ej. elementos operativos, controles giratorios, elementos de bloqueo.
- Limpie el cojín de cuero de la diadema con una toallita empapada en agente de limpieza.
- Para eliminar el desinfectante y secar después, hay que seguir las instrucciones proporcionadas por el fabricante del desinfectante.

### 3. Inspección y comprobación del funcionamiento



- Comprobar el aparato en busca de contaminantes o abrasiones visibles. Reprocesar de nuevo en caso necesario. Desechar si no se pueden eliminar los contaminantes.
- No utilizar, si se detectan daños o abrasión.

### 4. Almacenamiento

Almacenar de forma que esté protegido ante una recontaminación, el polvo y la humedad.

